

POSIGO

FLO2 Positionierungsweste



DE Gebrauchsanweisung

V1.1DE
GMN: 872076918P02N9

FLO₂

(DE) Gebrauchsanweisung

Verpackungsinhalt:

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf die richtige Größe und die dazugehörigen Teile. Die Größenbezeichnung befindet sich auf der Rückseite der Weste.



FLO2 Weste XS
SKU: P02XS
UDI-DI: 8720769180141



FLO2 Weste S
SKU: P02S
UDI-DI: 8720769180158



FLO2 Weste M
SKU: P02M
UDI-DI: 8720769180165



FLO2 Weste L
SKU: P02L
UDI-DI: 8720769180172



FLO2 Weste M (Female)
SKU: P02M-F
UDI-DI: 8720769180189



FLO2 Weste L (Female)
SKU: P02L-F
UDI-DI: 8720769180196



KEIN SICHERHEITSGURT FÜR DEN TRANSPORT!
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung die Anweisungen, um dieses Produkt korrekt anzuwenden.

Allgemein:

Die FLO2-Positionierungsweste besteht aus weicher Polsterung und Nylongurtband. Korrekte Einstellung und Nachjustierbarkeit ermöglichen eine bequeme Positionierung.

Das Material folgt den Konturen des Benutzenden für eine optimale Druckverteilung. Die flexiblen Hüftgurte lassen den Träger frei atmen.

Die Position der Halterung am Rollstuhl und die entsprechende Winkeleinstellung sind entscheidend für die Funktionsweise des Produkts.

Montage und Einrichtung:

Die Montage und Einstellung sollten von kompetentem (Gesundheits-)Personal durchgeführt werden.

Pflege:

Handwäsche bei maximal 30 °C und Feinwaschmittel, falls erforderlich. Nicht bügeln, schleudern oder im Trockner trocknen.



Rohrschelle (x4)

SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202



Klappschnalle 25mm (x4)

Für Weste XL, L, M, S
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134



Klappschnalle 20mm (x4)

Für Weste XS
SKU: KG20
UDI-DI: 8720769180547



Magnettaste (x2)

SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424



Tri-glide 25mm (x4)

Für Weste XL, L, M, S
SKU: 3GL25
UDI-DI: 8720769180486



Tri-glide 20mm (x4)

Für Weste XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493



Gurtführung 25mm (x4)

SKU: BG25
UDI-DI: 8720769180523



Gurtführung 15mm (x4)

SKU: BG15
UDI-DI: 8720769180530

Montage Schultergurte:

Bestimmen Sie die Position für die Klappschnallen, wobei Sie die Mitte der Schulter des Patienten beibehalten. **Die Höhe der Klappschnallen bestimmt die Leistung des Produkts. Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Therapeuten oder Technikers.**

Die Klappschnallen können bündig mit der Schulterlinie montiert werden (Abb. 2) oder darunter (Abb. 3). Wenn Sie die Schnallen unterhalb der Schulterlinie anbringen, lastet mehr Druck auf den Schultern.

Befestigen Sie die Klappschnallen mit den Rohrschellen an der gewünschten Stelle (Abb. 1) oder direkt an der Rückenlehne mit M5-Schrauben. Berücksichtigen Sie dabei immer die Anweisungen des Rollstuhlherstellers.



Fig. 2

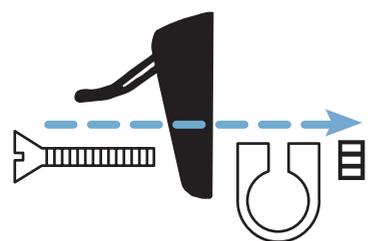


Fig. 1

Abb 1: Entfernen Sie die Schraube aus der Rohrschelle und befestigen Sie die Klappschnalle wie gezeigt an der Rohrschelle. Verwenden Sie den mitgelieferten Gummistreifen für zusätzlichen Halt am Rollstuhlrahmen.

⚠ Prüfen Sie die Weste und die Befestigungselemente regelmäßig auf Verschleiß/Spiel. Überprüfen Sie auch regelmäßig die Spannung der Gurte und Polsterteile.



Fig. 3

Taille / Hüfte Band:

Befestigen Sie nun die Klappschnallen, mit denen die beiden unteren flexiblen Teile der Weste (mit ‚Waist‘ gekennzeichnet) am Rahmen des Rollstuhls befestigt sind.

Diese Klappschnallen müssen in der blauen Zone angebracht werden (Abb. 4) und sorgen dafür, dass der Gurt bequem über den unteren Teil des Rippenbogens verläuft (vorzugsweise $\pm 45^\circ$).

Die 25 mm (S - XL) oder 15 mm (XS) Gurte können jetzt in die Klappschnalle geschoben werden. Bringen Sie den Patienten in die gewünschte Position.

Die Spannung der beiden oberen (Schulter-)Gurte bestimmt den Druck auf die Schultern und den Grad des Zurückziehens. Bestimmen Sie diese Spannung immer in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten oder einer kompetenten Person.



Fig. 4

⚠ Berücksichtigen Sie bei der Montagerichtung der Hüft-/Taillengurte eventuelle Bauchsonden, damit die Weste kein Hindernis darstellt.

Befestigung mit Schiebeschnalle.

Wenn der Rollstuhl nicht für die Montage mit Rohrschellen/ Klappschnallen geeignet ist, können die Gurte auch mit den mitgelieferten Tri-Glide-Schiebeschnallen befestigt werden.

Führen Sie das Ende des Gurtes durch die Schiebeschnalle (Abb. 5). Vergewissern Sie sich, dass sich die Schnalle auf der Höhe der gewünschten Befestigungsposition am Rollstuhl befindet (siehe auch Abb. 2 und 3).

Wickeln Sie das Ende des Gurtes um den Rahmen des Rollstuhls und führen Sie es durch die Schiebeschnalle zurück (Abb. 6, 7).

Ziehen Sie nun das Ende des Gurtes so fest wie möglich, so dass die Schiebeschnalle fest am Rahmen des Rollstuhls anliegt (Abb. 8).



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

⚠ Überprüfen Sie die Gurte und Tri-Glide-Schiebeschnallen regelmäßig auf Spiel.

Lose Gurte sichern.

Um zu verhindern, dass sich die losen Enden der Gurte zwischen den beweglichen Teilen des Rollstuhls verfangen, sollten diese Enden mit Hilfe der Gurtführungen gesichert werden.


Schieben Sie das lose Ende des Gurtes durch die Führung (Abb. 9) und klemmen Sie den Gurt mit dem Clip fest (Abb. 10).



Öffnen/Schließen/Entfernen.

Mit den seitlichen Druckknöpfen an jedem Befestigungsgurt (Abb. 11) kann die Weste geöffnet/abgenommen werden.

Der seitliche Druckknopf kann geöffnet werden, indem Sie mit Daumen und Zeigefinger durch den Stoff drücken, unter dem sich der seitliche Druckknopf befindet (Abb. 12).

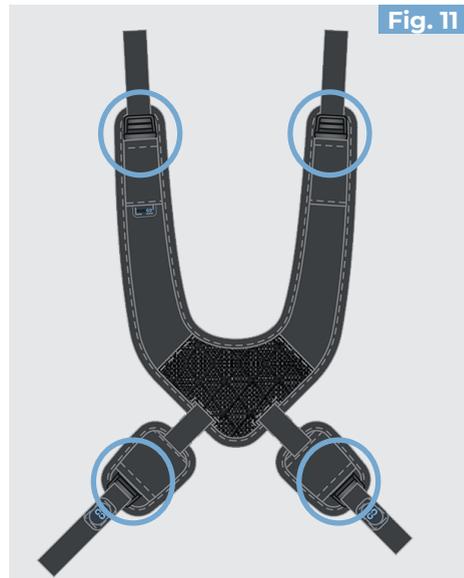

⚠ Wenn der Benutzer körperlich oder kognitiv nicht in der Lage ist, die Weste im Notfall zu öffnen, sollte während der Benutzung der Weste immer eine Pflegeperson anwesend sein.

Integrierte Magnete.

Die Hüft-/Hüftgurte enthalten einen Magneten auf der Höhe der Schnalle (Abb. 13) und können damit bei Transfers an den Metallrahmen des Rollstuhls befestigt werden.



Bei Rollstuhlrahmen aus nicht-magnetischem Material können die mitgelieferten selbstklebenden Magnetknöpfe an der gewünschten Stelle angebracht werden.



⚠ **GEFAHR DES VERSCHLUCKENS**
Überprüfen Sie die Magnetknöpfe vor jedem Gebrauch.



POSIGO

The Hague Care Development BV
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde (NL)

www.posigo.nl
info@posigo.nl

© 2023 Alle Rechten voorbehouden

CE