

**POSIG** 

Modularer  
Positionierungsgurt



**Gebrauchsanweisung**

V1.0DE  
GMN: 872076918P01N7



**KEIN SICHERHEITSGURT FÜR TRANSPORT!**  
Lesen Sie vor der Installation und Verwendung die Anweisungen vollständig durch, um dieses Produkt korrekt anzuwenden.

**Allgemein:**

Der Positionierungsgurt besteht aus einer weichen Polsterung und Nylongewebe. Korrekte Einstellung und Nachjustierbarkeit ermöglichen eine bequeme Positionierung.

Das Material folgt den Konturen des Benutzenden für eine optimale Druckverteilung. Die Position der Befestigung am Rollstuhl und die entsprechende Winkeleinstellung sind wichtig für die Funktionsweise des Produkts.

**Montage und Einrichtung:**

Die Montage und Einstellung sollten von kompetentem (Gesundheits-) Personal durchgeführt werden.

**Pflege:**

Handwäsche max. 30 °C und Feinwaschmittel, falls erforderlich. Nicht bügeln, schleudern oder im Trockner trocknen.



**Verpackungsinhalt:**

Überprüfen Sie die richtige Größe des Gurts und der dazugehörigen Teile



**Gurt XL**  
SKU: P01XL  
UDI-DI: 8720769180059



**Gurt L**  
SKU: P01L  
UDI-DI: 8720769180042



**Gurt M**  
SKU: P01M  
UDI-DI: 8720769180035



**Gurt S**  
SKU: P01S  
UDI-DI: 8720769180028



**Gurt XS**  
SKU: P01XS  
UDI-DI: 8720769180011



**Rohrschelle (x2)**  
SKU: RTC  
UDI-DI: 8720769180202



**Tri-glide 38mm (x2)**  
Für Gürtelgröße XL, L, M, S  
SKU: 3GL38  
UDI-DI: 8720769180479



**Gurtführung 38mm (x2)**  
SKU: BG38  
UDI-DI: 8720769180509



**Extra für optionale Konfiguration mit 4-Punkt-Gurt:**

**4-Punkt-Gurt (x2)**  
SKU: 4P20  
UDI-DI: 8720769180110



**Rohrschelle (x2)**  
SKU: RTC  
UDI-DI: 8720769180202



**Klappschnalle 40mm (x2)**  
Für Gürtelgröße XL, L, M, S  
SKU: KG40  
UDI-DI: 8720769180127



**Tri-glide 20mm (x2)**  
Für Gürtelgröße XS  
SKU: 3GL20  
UDI-DI: 8720769180493



**Gurtführung 20mm (x2)**  
SKU: BG20  
UDI-DI: 8720769180516



**Klappschnalle 25mm (x2)**  
Für Gürtelgröße XS  
SKU: KG25  
UDI-DI: 8720769180134



**Magnettaste (x2)**  
SKU: MBUD  
UDI-DI: 8720769180424



**Gefahr des Verschluckens.  
Kleinteile von Kindern  
fernhalten**

## Montage Rollstuhl.

1: Befestigen Sie die Klappschnallen mit den Rohrschellen an der gewünschten Stelle (Abb. 1). Berücksichtigen Sie dabei immer die Anweisungen des Rollstuhlherstellers.

1,1: Die Klappschnalle des Positionierungsgurts kann im orangefarbenen Bereich über den Oberschenkeln angebracht werden (Abb. 2). Dabei bildet der Positionierungsgurt einen Winkel von  $\pm 90$  Grad mit der Sitzfläche. Diese Methode übt Druck auf die Oberschenkel aus und stützt das Becken.

1,2: Die Klappschnalle kann auch in der blauen Zone in einem Winkel von  $\pm 45$  Grad angebracht werden (Abb. 3). Dieser Methode gibt mehr Druck auf den Beckenrand (Sips).

Die 40 mm (S - XL) oder 25 mm (XS) Gurte können jetzt in die Klappschnalle geschoben werden. Bringen Sie den Kunden in die gewünschte Position, die Position des Beckens ist ausschlaggebend.

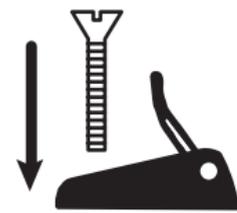


Abb. 1

Montage von Klappschnalle und Rohrschelle



Abb. 2



Abb. 3

## Befestigung durch Tri-Glides.

Wenn der Rollstuhl nicht für die Rohrschelle mit Klappschnallen geeignet ist, können die Gurte auch mit den mitgelieferten Tri-Glide-Schiebeschnallen befestigt werden.

1,3: Führen Sie das Ende des Gurtes durch die Schiebeschnalle (Abb. 4.). Vergewissern Sie sich, dass sich die Schnalle auf der Höhe der gewünschten Befestigungsposition am Rollstuhl befindet (siehe auch Abb. 2 und 3).

1,4: Wickeln Sie das Ende des Gurtes um den Rollstuhl und führen Sie es durch die Schiebeschnalle zurück (Abb. 5, 6)

1,5: Ziehen Sie nun das Ende des Gurtes so fest wie möglich an, so dass die Schiebeschnalle fest am Rollstuhl anliegt (Abb. 7).



Überprüfen Sie die Gurte regelmäßig auf Verschleiß und ob die Klappschnallen ausreichend funktionieren.

Überprüfen Sie die Gurte und Tri-Glide-Schiebeschnallen regelmäßig auf Spiel.



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

## Gurt einstellen.

2: Stellen Sie sicher, dass beide Drehknöpfe ganz nach links gedreht sind. Dies ist die entspannteste Position (Abb. 8).

3: Ziehen Sie beide Seiten des Positionierungsgurtes fest, bis er mit dem Becken oder den Oberschenkeln verbunden ist (Abb. 9).

4: Kontrollieren Sie mit einem Finger zwischen den Polstern und dem Patienten, wie die Spannung ist (Abb. 10).

5: Vergewissern Sie sich, dass die Polsterteile in der richtigen L/R-Verteilung an den Patienten anschließen (Abb. 10)

6). Lesen Sie die Größenangaben auf dem Gurt. Schließen Sie nun beide Klappschnallen. Der Gurt ist nun einsatzbereit.



**Prüfen Sie regelmäßig die Gurtspannung und ändern Sie sie bei Bedarf.**



Abb. 9



Abb. 10

## Feinabstimmung für Komfort bzw zusätzliche Unterstützung.

Der Gurt kann jederzeit angepasst werden. Wenn Sie die Drehknöpfe im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich die Spannung auf dem Gurt. Mit einem Finger zwischen Gurt und Patienten kann dies beurteilt werden.

Erhöhen Sie die Spannung, bis die richtige Unterstützung für das Becken erreicht ist. Drehen Sie die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung zu verringern (Abb. 11).



Abb. 11

## Beseitigung loser Gurte.

Um zu verhindern, dass die losen Enden der Gurte zwischen drehende Teile des Rollstuhls geraten, sollten sie mit den Gurtführungen gesichert werden.

Schieben Sie das Ende des Gurtes durch die Führung (Abb. 12) und sichern Sie den Gurt mit dem Clip (Abb. 13).



Abb. 12



Abb. 13

## Integrierte Magnete.

In die Polsterung sind Magnete eingearbeitet, so dass beide Seiten des Gurtes bequem am Rollstuhlrahmen befestigt werden können, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern (Abb. 14,15).



Bei Rollstühlen aus nicht-magnetischem Material können die mitgelieferten selbstklebenden Magnetknöpfe an der gewünschten Stelle angebracht werden.



**Gefahr des Verschluckens.**  
Überprüfen Sie die Magnetknöpfe vor jedem Gebrauch.



## 4-Punkt-Gurt (optional).

Auf der Naht (**P**) in Abb. 16 lassen sich zusätzliche Gurte hinzufügen (diese sind bereits vorhanden, wenn sie in dieser Konfiguration bestellt werden). Die zusätzlichen Riemen am Gurt haben die Funktion, den Gurt in der richtigen Höhe zu halten.

- Heben Sie das Etikett (**X**) in Abb. 16 nach oben und schieben Sie den 4-Punkt-Gurt an der Naht in die Position hinter den Stopper (**Y**) (Abb. 17).
- Montieren Sie nun den Gurt am Rollstuhlrahmen, wie unter der Überschrift **„Montage Rollstuhl“** beschrieben. (Seite 4).
- Bringen Sie die mitgelieferten 25 mm Klappschnallen im blauen Bereich an (Abb. 18). Beachten Sie dabei auch die Anweisungen des Rollstuhlherstellers.


Wenn die Klappschnallen mehr in Richtung des Knies des Patienten befestigt werden, wird der Positionierungsgurt stärker nach unten gezogen. Legen Sie diese Position gemeinsam mit dem Therapeuten fest.



Die 4-Punkt-Gurte sind vormontiert oder können als Nachrüstsatz unter [www.posigo.nl](http://www.posigo.nl) bestellt werden





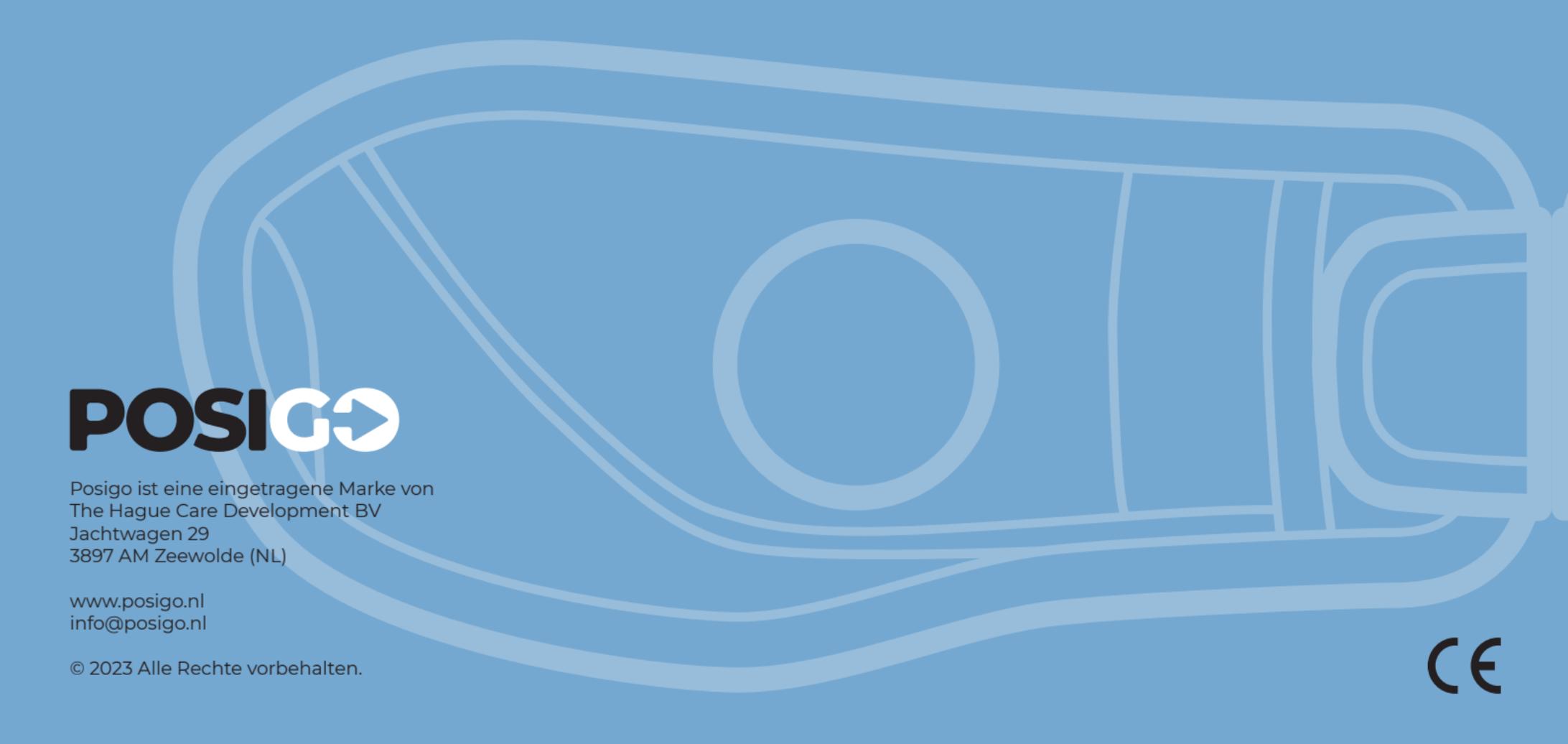

**POSIGO** 

Posigo ist eine eingetragene Marke von  
The Hague Care Development BV  
Jachtwagen 29  
3897 AM Zeewolde (NL)

[www.posigo.nl](http://www.posigo.nl)  
[info@posigo.nl](mailto:info@posigo.nl)

© 2023 Alle Rechte vorbehalten.

CE