

POSIGO

FLO2 Positioneringsvest



DK Brugsanvisning

V1.1DK
GMN: 872076918P02N9

FLO₂


(EN) Brugsanvisning

Indholdspakke:

Kontroller emballagens indhold for at sikre den korrekte veststørrelse og at tilbehøret er komplet. Størrelsesangivelsen er placeret på bagsiden af vesten.



FLO2 Vest XS
SKU: P02XS
UDI-DI: 8720769180141

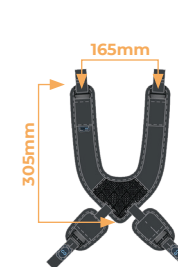

FLO2 Vest S
SKU: P02S
UDI-DI: 8720769180158



FLO2 Vest M
SKU: P02M
UDI-DI: 8720769180165



FLO2 Vest L
SKU: P02L
UDI-DI: 8720769180172



FLO2 Vest M (Female)
SKU: P02M-F
UDI-DI: 8720769180189



FLO2 Vest L (Female)
SKU: P02L-F
UDI-DI: 8720769180196



DETTE ER IKKE EN SIKKERHEDSSELE TIL TRANSPORTFORMÅL
Læs instruktionerne omhyggeligt før montering og brug.

Generel information:

FLO2-positioneringsvesten er lavet af blød polstring og nylonvæv. Sikker og komfortabel positionering kan opnås ved korrekt indstilling og om nødvendigt justering.

Materialet følger brugerens konturer for optimal trykfordeling. De fleksible hofteseler med FLO2-teknologi giver brugeren mulighed for at trække vejret frit.

Moneringsstedet på kørestolen og de tilhørende vinkelindstillinger er afgørende for korrekt brug af dette produkt.

Montering og justering:

Montering på kørestolen og justering skal udføres af kvalificeret (omsorgs) personale.

Vedligeholdelse:

Håndvask maks. 30°C, valgfrit vaskemiddel til finvask. Må ikke stryges, centrifugeres eller tørretumbles.



Rundrørsklemme (x4)

SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202



Kamspænde 25mm (x4)

For størrelse XL, L, M, S
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134



Kamspænde 20mm (x4)

For størrelse XS
SKU: KG20
UDI-DI: 8720769180547



Magnetknopper (x2)

SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424



Tri-glide 25mm (x4)

For størrelse XL, L, M, S
SKU: 3GL25
UDI-DI: 8720769180486



Tri-glide 20mm (x4)

For størrelse XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493



Bælteguide 25mm (x4)

SKU: BG25
UDI-DI: 8720769180523



Bælteguide 15mm (x4)

SKU: BG15
UDI-DI: 8720769180530

Montering af skulderstropper:

Bestem positionen for kamspænderne, centreret på patientens skulder. **Den lodrette position af kamspænderne bestemmer produktets funktion. Følg terapeutens eller den kvalificerede teknikers instruktioner.**

Kamspænderne kan monteres i niveau med skulderlinjen (fig. 2) eller under den (fig. 3). Montering af spænderne under skulderen lægger mere pres på skuldrene.

Fastgør kamspænderne til kørestolens stel i den ønskede position ved hjælp af rundørsklemmerne (fig. 1) eller direkte på ryglænet ved hjælp af M5-bolte. Tag altid kørestolsproducentens instruktioner i betragtning.



Fig. 2

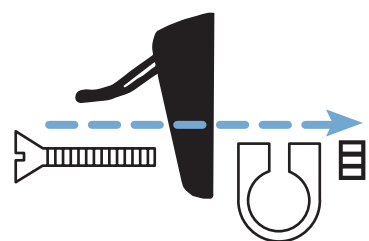


Fig. 1

fig. 1: Fjern skruebolten fra rundørsklemmen, og monter kamspændet på rørklemmen som vist i eksemplet. Brug den medfølgende gummiliste for ekstra greb på kørestolsstellet.


 **Kontroller regelmæssigt vesten og monteringsmaterialerne for slid og korrekt spænding. Kontroller også regelmæssigt stropper og polstring for slid og slør.**



Fig. 3

Talje-/hoftestropper:

Fastgør kamspænderne til kørestolens stel for at fastgøre de to nederste fleksible dele af vesten (markeret med 'talje').


Disse kamspænder skal monteres i den blå zone (fig. 4) og tillade stroppen at løbe komfortabelt over den nederste del af ribbebuen (helst ved $\pm 45^\circ$).

25 mm (S – XL) eller 15 mm (XS) stropper kan nu skubbes ind i kamspændet. Placer brugeren i den ønskede position.

Strammen på de to øverste (skulder)stropper bestemmer trykket på skuldrene og tilbagetrækningsgraden. Bestem altid denne spænding i samarbejde med en terapeut eller en autoriseret person.



Fig. 4

 **Når du fastgør hofte-/taljeselerne, skal du sørge for, at vesten ikke kan blokere mavesonder eller stomier.**

Montering med tri-glide spænder:

Hvis kørestolens stel ikke er egnet til montering med rundørsklemmer / kamspænder, kan remmene også fastgøres med de medfølgende tri-glide glidespænder.

Træk enden af remmen gennem tri-glide spændet (fig. 5). Sørg for, at spændet er placeret på kørestolen i højden af den ønskede monteringsposition (se også fig. 2 og 3).

Vikl enden af remmen rundt om kørestolens stel, og før den tilbage gennem tri-glide spændet (fig. 6, 7).

Træk nu enden af remmen så stramt som muligt, så glidespændet sidder fast mod kørestolens stel (fig. 8).



Fig. 5

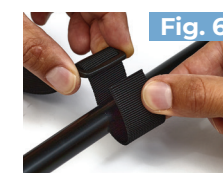



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

 **Kontroller regelmæssigt remmene og tri-glide-spænderne for slæk.**

Fastgørelse af løse stropper.

For at forhindre, at de løse ender af stropperne vikler sig ind mellem kørestolens bevægelige dele, skal disse ender fastgøres ved hjælp af bælteguides.

Før den løse ende af stroppen gennem bælteguiden (fig. 9), og fastspænd derefter stropens ende med klipsen (fig. 10).



Fig. 9



Fig. 10

Åbn / luk / fjern.

Vesten kan åbnes / fjernes ved hjælp af sideudløsserspænderne på hver fastgørelsesstrop (fig. 11).


Frigør sideudløsserspænderne ved at klemme gennem stoffet, under hvilket spænderne er placeret (fig. 12).



Fig. 11



Fig. 12

 Hvis brugeren fysisk eller kognitivt ikke er i stand til at åbne vesten i tilfælde af en nødsituation, skal en omsorgsperson være til stede til enhver tid.

Integrerede magneter.

Talje- / hoftebælterne indeholder en magnet nær spændet (fig. 13) og kan fastgøres til kørestolens metalramme under overførsler.



For kørestolrammer af ikke-magnetisk materiale kan de medfølgende selvklæbende magnetknopper fastgøres på ønsket position.



Fig. 13



FARLIGT AT SLUGE
Kontroller magnetknopperne før hver brug.



POSIGO

The Hague Care Development BV
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde (NL)

www.posigo.nl
info@posigo.nl

© 2025 Alle rettigheder forbeholdes

CE